

SHOCK WAVE



Uno dei problemi estetici più comuni nelle donne è la cellulite. Questa è infiammazione dei tessuti molli, un accumulo di tessuto adiposo sotto forma di noduli di grasso e tossine, che colpisce sia il derma e il tessuto sottocutaneo, Spesso si manifesta con irregolarità della pelle (buccia d'arancia) e potrebbe essere associato a dolore a seconda della tipo di cellulite.

Ci sono molti trattamenti che promettono di sradicare o ridurre al minimo questo problema e uno dei più efficaci è rappresentato dalle onde d'urto.

Ci sono 4 fasi nell'evoluzione della cellulite ed di solito si localizza su cosce, glutei, addome, braccia ... Uno dei trattamenti disponibili presso i centri estetici è il trattamento con onde d'urto che, anche se non promette di eliminare il problema completamente, aiuta a una riduzione del fenomeno, diminuendo la cellulite e rassodando la pelle nell'arco di poche sedute.

Vengono utilizzate due "pistole", la prima con una testa più piccola che il professionista, dopo aver applicato un gel conduttivo per ultrasuoni, fa scivolare direttamente sull'area da trattare per qualche minuto.





Questa testa applica una percussione sui tessuti, provocando la rottura dei noduli di grasso dove si annida la cellulite, levigando la pelle in poche sedute a seconda di ogni caso. Inoltre questa percussione sulla pelle riattiva la circolazione il che dona l'elasticità e stimola la produzione di collagene.

La seconda testa è più ampia ed esegue un massaggio drenante. Questo drenaggio contribuirebbe ad eliminare le tossine dai tessuti che precedentemente sarebbero state liberati con la percussione della prima testa.

Tecnologia elettromagnetica.

Sono comprese 5 testine intercambiabili di dimensioni diverse in base alla parte del corpo da trattare e alla tipo di terapia che viene effettuata.

Sono comprese anche 4 coppette per la stimolazione elettromagnetica dei muscoli. Con l'utilizzo sinergico delle due funzioni si ha una stimolazione profonda e una superficiale dei tessuti per un risultato ottimale.

Frequency: 50/60 HZ

Output frequency: 16

Input energy level: 16

Power: watt 150 max



Distribuito da **SMC AGENCY SRLS**

Estetica Professionale – Medicina Estetica
Via Leonardo da Vinci, 9 – 25020 Offlaga (BS)
+39 338 80 14 334 – info@smc-agency.com